

Serchem
HYGIENE DECONTAMINATION
Multi-Active8

**Panduan
langkah demi langkah**

1
Sediakan Multi-Active8 dan
pakai sarung tangan dan mask.



2

Buka semua sendi-sendi instrument.



3

Buangkan semua "Gross Soil"
dengan cara mengelap.



4

Putarkan muncung Multi-Active8
kepada "ON".



5

Semburkan Multi-Active8 keatas
semua bahagian instrument set.




6

Simpan dan hantarkan instrument
untuk dibasuh dalam bekas
tertutup tidak melebihi jangka
masa 72 jam.



MAYMEDIC
technology sdn. bhd.

No. 19, Jalan 5/152,
Batu 6, Jalan Puchong,
Taman Perindustrian OUG,
58200 Kuala Lumpur. Malaysia.
Tel : +60 3 7785 9380, +60 3 7785 9381

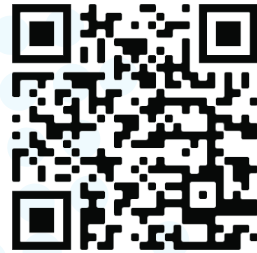

maymedic.com.my

TENGOK VIDEO

